



copyright 2022 © by Josoncare all right reserved We reserve the right to change the contents of the products without noticing

JosonCare

強盛興企業股份有限公司

台中公司地址：
407403 台中市西屯區成都路280號1樓
Tel:886-4-23160743 Fax:886-4-23160740

龜山廠工廠地址：
333024 桃園市龜山區福源里湖山街180巷77弄11號
Tel:886-3-3290925 Fax:886-3-3290921

Email: overseas_ma@joson-care.com.tw
overseas_mb@joson-care.com.tw

www.hospitalbed-josoncare.com



Document No.: JCQB-099
Release Date: 2022.01.01
Version: H



版權所有 翻印必究

安全第一 • 品質優良 • 永續經營



強盛興企業股份有限公司

宗旨：用專業的醫療產品，照顧服務全人類

願景：改善醫療環境、提高醫療品質、增加醫療效率

目標：協助國內外醫療機構改善醫療設備，提高產品品質，增加外銷出口，加強研發能力提高台灣競爭力

核心價值：安全第一、品質優良、永續經營

強盛興工廠

本公司成立於2000年，主要營業項目為醫療設備居家護理設備，及新床型的研發，且增加工廠的機器設備，現有工廠面積約1600多坪生產組裝線3條，機械手臂12台，自有焊燒模組具約200多組，自有塑膠模組具約400多組，各類型彎管機、壓模機、研磨機、鑽孔機等基礎工具機共約60多台。

並於
2005年
通過衛福部 GMP 優良工廠

2005年
通過 ISO13485

2005年
通過 CE 及 FDA

2005年
取得各種產品的衛署許可證

2007年
通過 IEC60601-1-2 醫療認證

2008年
通過 IEC60601-2-38 醫療認證

2014年
通過最新 IEC60601-2-52 醫療認證

2015年
通過最新 IEC60601-2-52 醫療認證新床型

2017年
通過最新 IEC60601-2-52 醫療認證另一新床型

2018年
研發完成可傳輸資料及預防掉落之磅秤床

2019年
病床全面採用數位化程式控制

美國 FDA 註冊號碼:3006554931

品質檢測系統

本公司設廠以來最重視品質管制，除了嚴格遵守 ISO13485 管制外，另採購許多測試機器做為品管的前哨，提高產品品質在嚴格品管程序層層把關（進料檢驗→製程檢驗→成品檢驗）充足的檢驗設備，廠內即可控管進料品質，成品亦可經由壽命測試改進，減少使用故障，進而提高產品壽命。

- 全國首創第一條病床標準製程生產線
- 生產線設立多處品質管制站，嚴格控制品質
- 自動化機械手臂焊接，製造出精密及堅固的床體
- 效率的生產及倉儲管理，製造出高品質的病床



組裝病床照片

組裝病床照片


機械手臂焊接




生產線上測試站

細部組裝病床照片

工廠全景

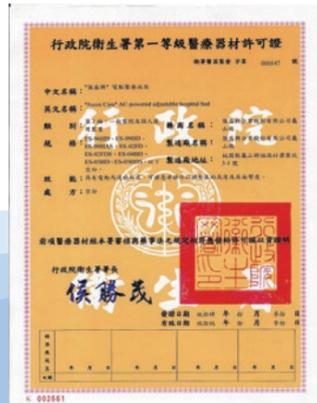


行政院衛生署醫療器材許可證

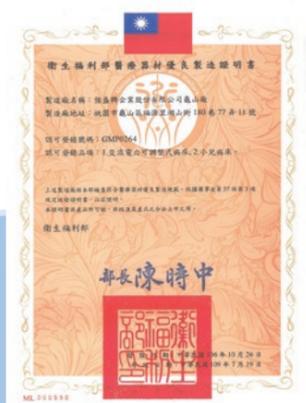

衛生署醫療器材優良製造規範 GMP 認證



ISO 及國際醫療安規等證書

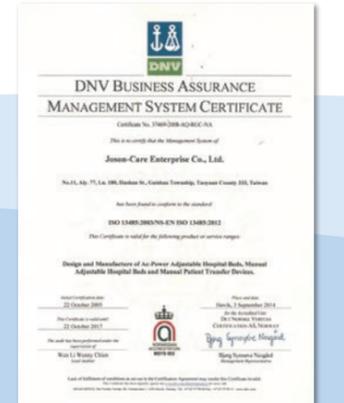

銷售全世界各地



目錄

ICU電動加護床 ES-19HD & ES-19DF	7
ICU電動加護磅秤床 & 尊爵型電動床 ES-12DW & ES-12HD & ES-12DF & ES-11HD	15
加護型電動床 ES-96HD	23
旗艦型電動床 ES-05HD	24
旗艦型電動床(護欄升起床身全寬100cm) & 手動床 ES-05HDS & MS-05HS	25
精緻型電動床 ES-99HDS	27
多功能護理電動床 ES-02JH	31
標準型電動照護床 & 標準型手動照護床 ES-02FDS & MS-02FS & MF-02FS	32
標準型電動床 & 手動床 ES-16NS & MS-16NS	33
養護型電動床 & 養護型手動床 ES-08FDS & MS-08FDS & MF-08FS	37
養護型電動床(鐵板床面) ES-08FSS	38
居家照護電動床 EN-1M	39
小兒病床 JC-011 & JC-012	41
嬰兒床 JC-030 & JC-031	42
骨科牽引架 JT-100	43
醫療床墊 JS-301 & JS-302 & JS-303	44
移動式餐桌 JR-031 & JR-031P	45
病房備品 床頭櫃 JF-012 & JF-014 / 陪伴椅 JU-010 & JU-011 點滴架 JR-016 / 餐桌&餐板 JR-011 & Y0307-SY	46
多功能液壓推床 JE-350	47
JE-300	48
JE-200	49
急診推床 JE-130 & JE-120 & JE-100	51
急救車 & 護理工作車 & 藥車 JA-107	53



In accordance with the following standards:
IEC/EN-60601-1, IEC/EN-60601-1-2,
IEC 60601-2-38 et amdt 1., IEC 60601-2-52
Beds in conformity with Directive 93/42/EEC
FDA Registration

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更之權利


19系列

ICU電動加護床



ES-19HD ICU電動加護床

衛部醫器製壹登字第000547號

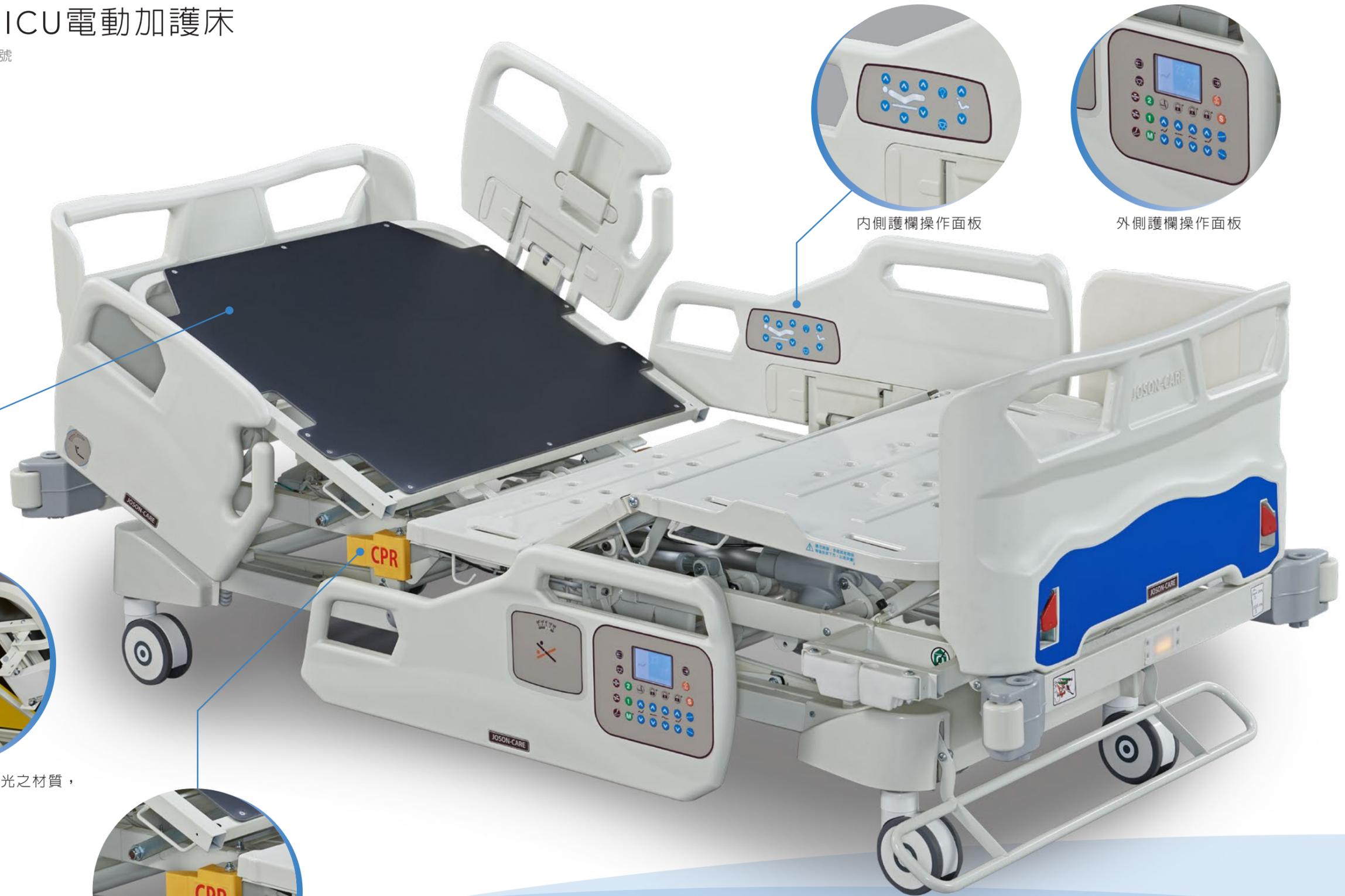





內側護欄操作面板

外側護欄操作面板

背部床面使用可透射X光之材質，
下方配有X光片固定座



緊急狀況時，可使背部床面快速
放平，以便進行CPR急救病患

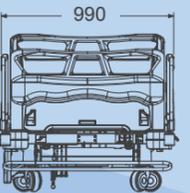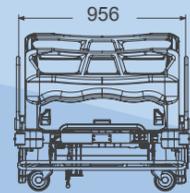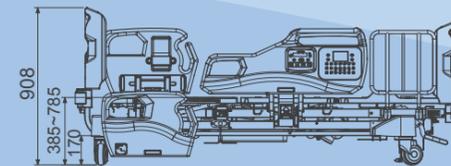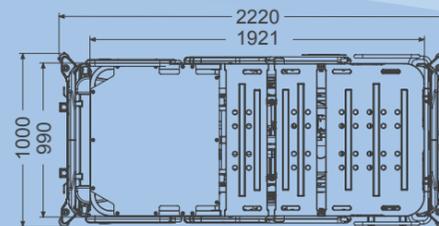

ES-19DF ICU電動加護床

衛部醫器製壹登字第000547號



背部床面使用可透射X光之材質，
下方配有X光片固定座



緊急狀況時，可使背部床面快速
放平，以便進行CPR急救病患



背部傾斜指針式
角度顯示器








床體傾斜指針式
角度顯示器



照地燈



床底置物盒

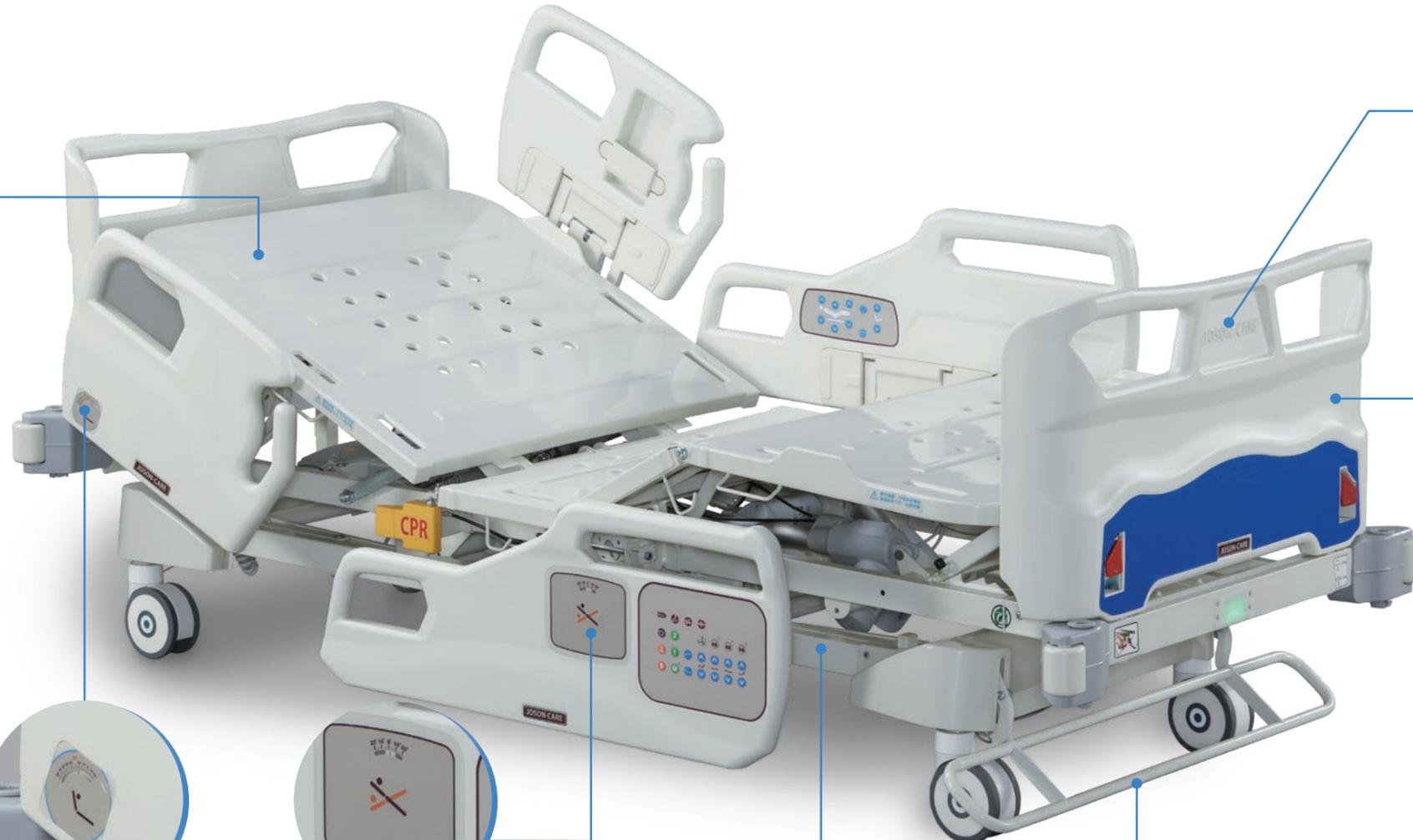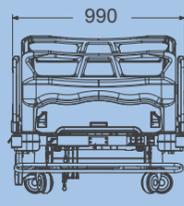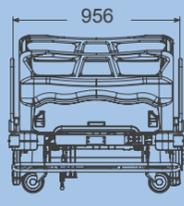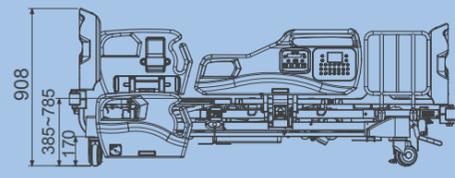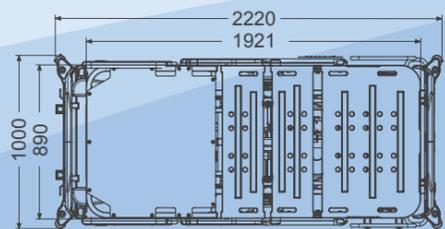

選配功能配件



固定式床頭




床身傾斜時，床頭不會移動




床身高低指示燈

外側護欄控制面板

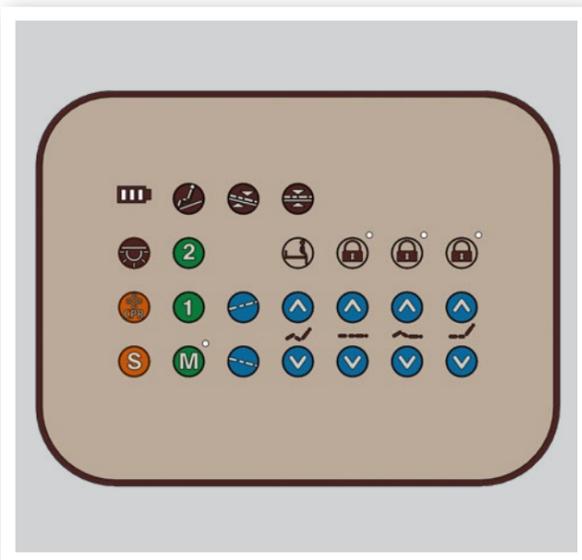

標配

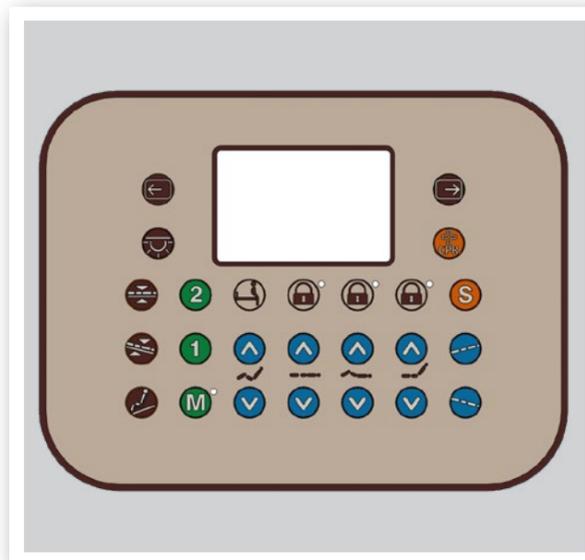

選配液晶

型號	ES-19HD	ES-19DF
規格		
床全長(至防撞塊)	L: 2220mm	
床全寬(護欄升起/護欄放下)	W: 958mm(護欄放下);990mm(護欄升起)	
床面長	L: 1925mm	
床面寬	W: 885mm	
床面高度	H: 385-785mm(5") 或 H: 410-810mm(6")	
背部床面升降	0-80°	
膝部床面升降	0-30°	
床面傾斜	±18°	
安全負載	230Kg	
床輪直徑	5"或 6"	
傳動方式(DC24V馬達數)	4	
供給電壓&頻率	AC100-240V;50/60Hz	
後備儲電電池	DC 24V 2.0Ah	
防水等級(電控系統)	IP66	
醫療安規認證	IEC 60601-2-52	

	功能配備	
背部X-Ray	●	○
內側護欄控制面板	●	●
外側護欄控制面板		●
液晶護士操作面板	●	○
床體/背部傾斜角度顯示	●	●
背部CPR快速釋放	●	○
防撞輪	●	●
鎖定功能	●	●
復歸功能	●	●
診查姿勢	●	●
引流姿勢	●	●
一鍵坐姿	●	●
電動傾斜	●	●
防塵中控煞車雙輪	●	●
點滴架插孔(4個)	●	●
引流袋掛勾(4個)	●	●
床面檔片	●	●
高度警示燈/煞車警示燈	●	●
照地燈	●	○
第三護欄	○	○
約束帶固定件	○	○

● = 標配 ○ = 選配

規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm

護欄寬 正負30mm

角度 正負5%

12系列

ICU磅秤及尊爵型電動床



ES-12DW ICU電動加護磅秤床

ES-12HD 尊爵型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號



床尾控制

ES-12DW(磅秤床)



5功能床尾控制面板設有磅秤及離床監視

ES-12HD




5功能床尾控制面板設有鎖定及復歸按鍵



床體傾斜指針式
角度顯示器




背部傾斜指針式
角度顯示器

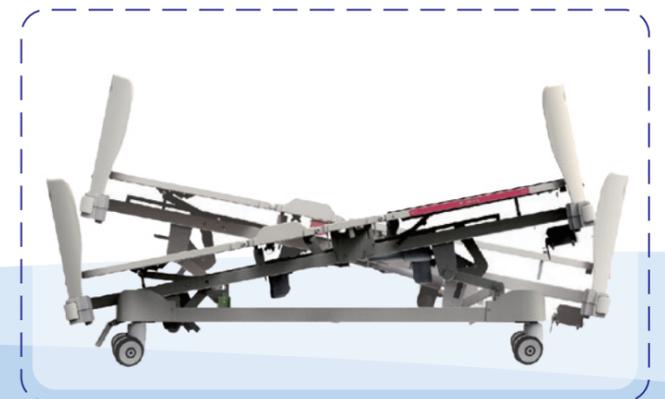


國際醫療安規認證

1. 國際認可醫療電器設備：一般安全性要求IEC/60601-1
2. 醫療電器設備電磁相容性、干擾的標準：IEC/60601-1-2
3. 醫療電動病床的特定安全規定：IEC/60601-2-52

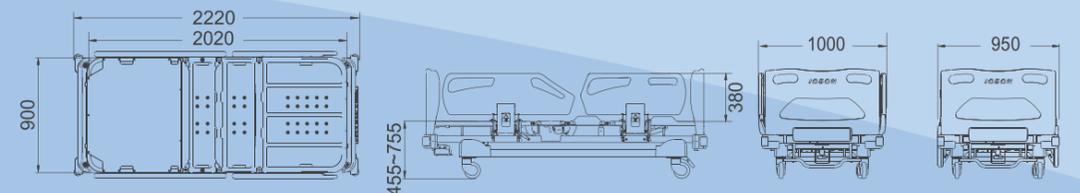

ES-12DF
ES-11HD
尊爵型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號

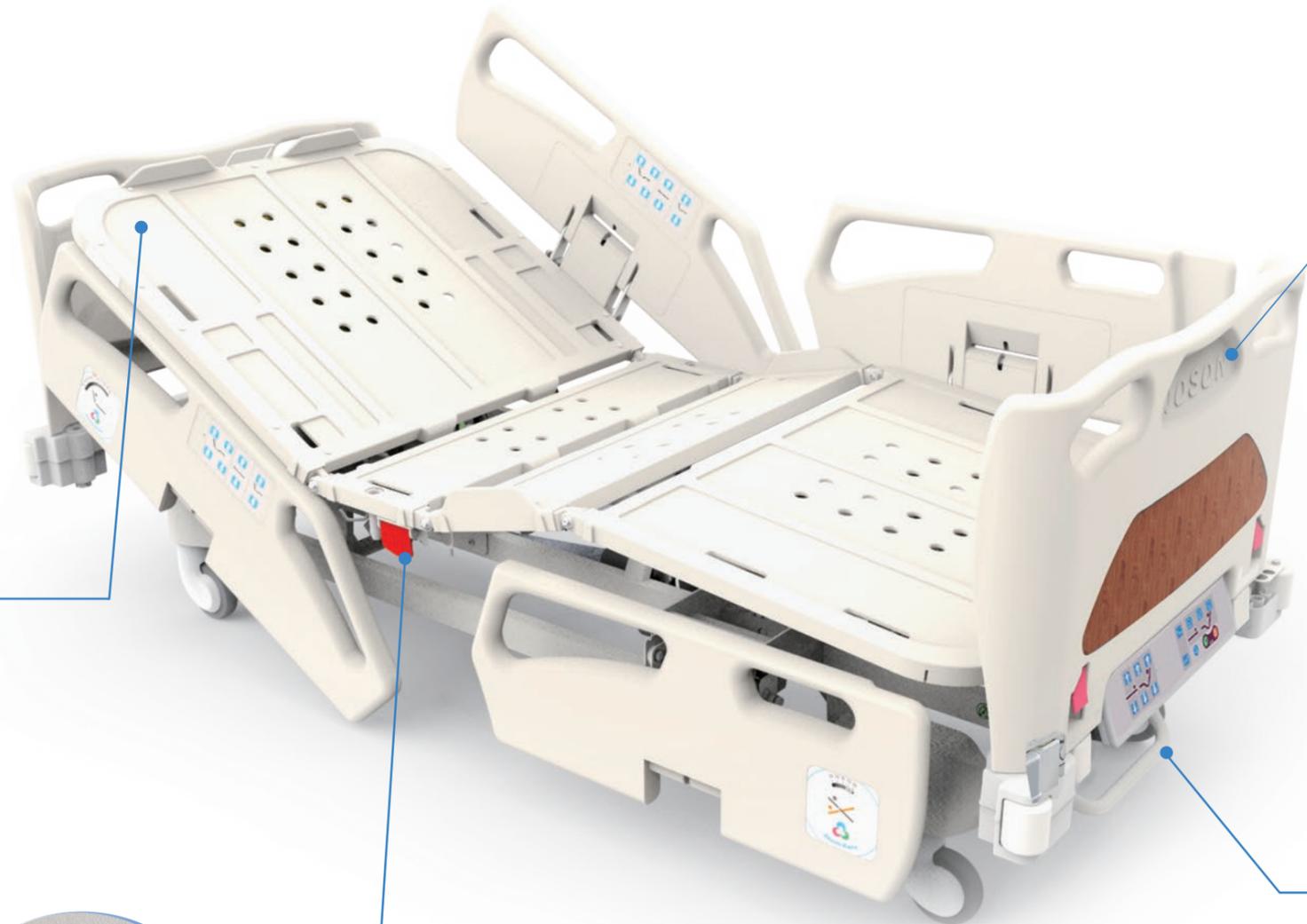

選配功能配件



背部床面使用可透射X光之材質，
下方配有X光片固定座




床尾延伸20公分



5吋防塵中控剎車系統，
採床尾踏桿，
一次踩踏即可全床剎車



緊急狀況時，
可使背部床面快速放平，
以便進行CPR急救病患

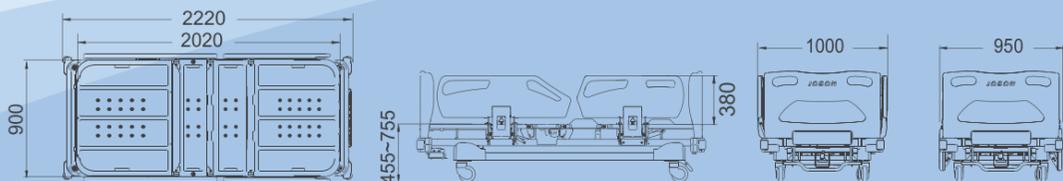

IEC 60601-2-52認證



11、12系列床系皆符合 IEC 60601-2-52醫療安規，床頭尾板及護欄間隙小於6公分。



磅秤功能 & 床尾控制

磅秤功能

1. 承重: 0~230kg
2. 準確度: 100g
3. 公斤/磅 單位轉換
4. 離床監視功能
5. 鎖住(Hold)功能



型號	ES-12DW	ES-12HD	ES-12DF	ES-11HD
規格				
床全長 (至防撞塊)	L:2220mm			L:2120mm
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	W:950mm (護欄放下) ; 1000mm (護欄升起)			
床面長	L:2020mm			L:1920mm
床面寬	W:900mm			
床面高度	H:455~755mm			
背部床面升降	0~75°			
膝部床面升降	0~30°			
床面傾斜	± 12°		選配	± 12°
安全負載	230Kg			
床輪直徑	5"			
傳動方式(DC24V) 馬達數	4	4	3/4	3
供給電壓&頻率	AC 100~240V;50/60Hz			
後備儲電電池	DC 24V 2.0Ah			
防水等級 (電控系統)	IP66			
醫療安規認證	IEC 60601-2-52			
功能配備				
背部X-Ray	●	●	○	●
護欄雙面按鍵	●	●	●	●
床體/背部傾斜角度顯示	●	●	●	●
CPR快速釋放	●	●	○	●
防撞輪	●	●	●	●
床尾控制	●	●	●	●
手持床尾操作器	●	●	●	●
磅秤	●			
鎖定功能	●	●	●	●
復歸功能	●	●	●	●
手動控制系統			○	
床尾延伸	●	●	○(3) / ●(4)	○
電動傾斜	●	●	○	●
5吋防塵中控煞車雙輪	●	●	●	●
5吋防塵煞車輪				●
點滴架插孔	●(6)	●(6)	●(6)	●(6)
引流袋掛勾	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)
床面擋片	●(6)	●(6)	●(6)	●(6)
警示燈	●	●	●	●
照地燈	○	○	○	○
液晶手控器	○	○	○	○
Wifi	○	○	○	○

● = 標配 ○ = 選配

規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

96.99.05 系列 旗艦型電動床



ES-96HD 加護型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號



ES-05HD 旗艦型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號



選配功能配件



手持床尾操作器



護欄雙面按鍵

內側按鍵由使用者自行調整,外側由醫護人員調整,避免病患及醫護人員交互感染;內外側均提供背、膝、床面升降及頭膝聯動高度調整。



背部傾斜角度顯示,於選配之配件



床尾控制

床尾下方另設有一控制面板,提供醫護人員作特殊功能控制



鎖定功能

設於床尾控制器,由醫護人員控制,可分別鎖定背部升降、膝部升降及床面升降



中控煞車系統

5吋防塵輪,可防止毛髮捲入輪心;系統採用床尾踏桿,一次踩踏即可全床煞車



CPR快速釋放


緊急時扳開CPR,即可使背部床面快速放平,以進行CPR急救病患





床尾控制系統含鎖定及復歸功能




拆卸式床頭尾板設有紅色固定開關

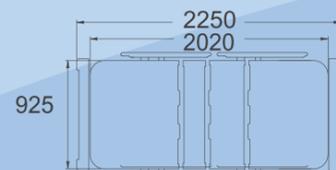

一般輪
H:395~695
中控輪
H:455~755

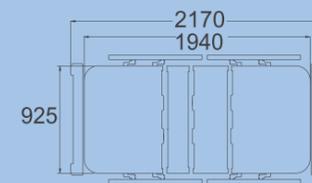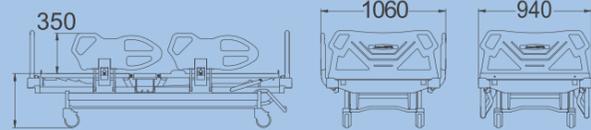

一般輪
H:395~695
中控輪
H:455~755

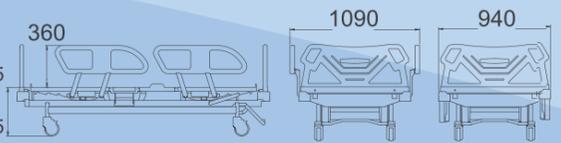

ES-05HDS

旗艦型電動床(護欄升起床身全寬100cm)

衛部醫器製壹登字第000547號




選配功能配件



手持床尾操作器

標準配備

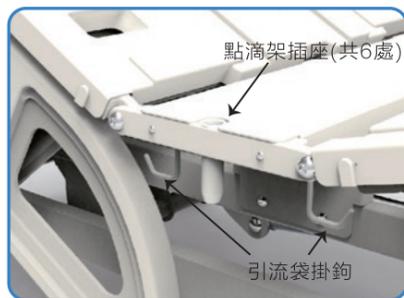


點滴架插座(共6處)

引流袋掛鉤



床面四周凸起，可防止床墊滑動

透氣孔

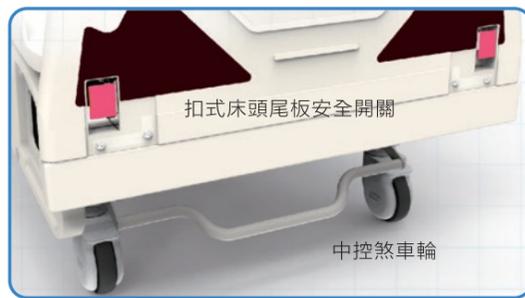


扣式床頭尾板安全開關

中控煞車輪

說明

1. 床體結構為鋼製粉體塗裝。
2. 床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔頭角及左右二側共凸起八處，可防止床墊滑動。
3. 引流袋（尿袋）掛勾設於左右二側臀板下方。
4. 床體四角設有防撞裝置，避免床體移動之碰撞損壞床體。
5. 床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之使用。左右設有安全開關，方便拆卸。
6. 護欄為塑鋼材質，旋轉式共4組，放下時縮於床面下方；每組護欄外側設有安全開關；欄框之設計易於施力移動病床。
7. 附充電電池，以配合臨時停電或移動病床時使用。
8. 可調整床身至座椅的位置，以便病患用餐或閱讀。
9. 設頭、膝聯動控制鍵，可同時調整背部及膝部位置，使病患隨時調整最舒適的位置。

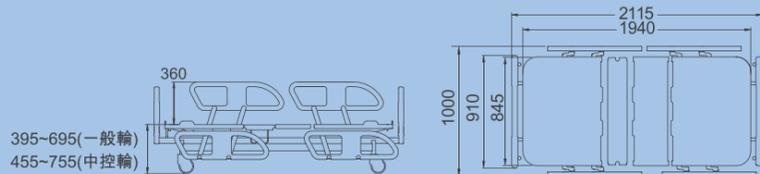

395-695(一般輪)
455-755(中控輪)

MS-05HS

旗艦型手動床

衛部醫器製壹登字第003251號

新型第 M342806號專利



說明


1. 床體結構為鋼製粉體塗裝。
2. 床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔；手、腹、膝、腳設有約束帶孔；頭腳及左右二側共凸起六處，可防止床墊滑動。
3. 引流袋（尿袋）掛勾設於左右二側臀板下方。
4. 床體四角設有防撞裝置，避免床體移動之碰撞損壞床體。
5. 床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之使用。左右把手斜面易於施力移動病床，床體四周設有紅色開關固定床頭尾板。
6. 可調整床身至座椅的位置，以便病患用餐或閱讀。
7. 護欄為塑鋼材質，旋轉式共4組，放下時縮於床面下方；每組護欄外側設有安全開關；欄框之設計易於施力移動病床。



床頭尾開關




點滴架放置設計

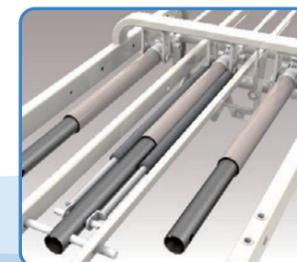


手動床輔助裝置

床身搖桿加裝氣壓缸，輕搖省力，增加搖桿使用壽命

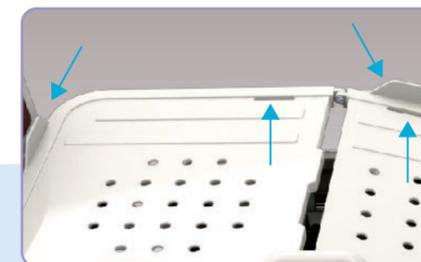


床墊防滑、約束帶孔設計

床面四周凸起，可防止床墊滑動

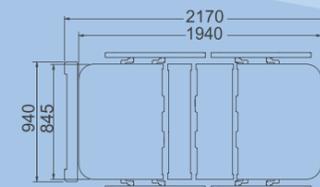

395-695(一般輪)
455-755(中控輪)

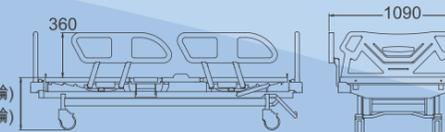

精緻型電動床

ES-99HDS 精緻型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號



點滴架插座共六處
引流袋掛勾設於左右兩側臀板下方




引流袋掛鉤 點滴架置放座(選配)

床面四周凸起,可防止床墊滑動



約束帶孔設計

5吋防塵煞車輪

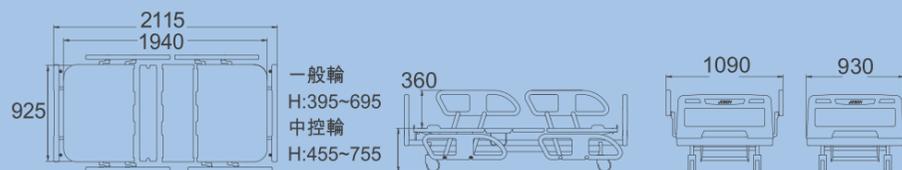

型號	ES-96HD	ES-05HD	ES-05HDS	MS-05HS	ES-99HDS
規格					
床全長 (至防撞塊)	L:2250mm	L:2170mm	L:2115mm	L:2170mm	L:2115mm
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	ES-96HD-W:940mm(護欄放下);1060mm(護欄升起) ES-05HD-W:940mm(護欄放下);1090mm(護欄升起) ES-05HDS-W:910mm(護欄放下);1000mm(護欄升起) MS-05HS-W:940mm(護欄放下);1090mm(護欄升起) ES-99HDS-W:930mm(護欄放下);1090mm(護欄升起)				
床面長	L:2020mm	L:1940mm			
床面寬	W:925mm		W:845mm	W:925mm	
床面高度	中控輪H:455~755mm / 一般輪H:395~695mm				
背部床面升降	0~85°				
膝部床面升降	0~32°				
床面傾斜	±12°	選配			
安全負載	225Kg				
床輪直徑	5"				
傳動方式(DC24V) 馬達數	4	3	3	手搖桿	3
供給電壓&頻率	AC 100~240V;50/60Hz			無供給電壓&頻率	AC 100~240V;50/60Hz
後備儲電電池	DC 24v 2.0Ah			無後備儲電電池	DC 24v 2.0Ah
防水等級 (電控系統)	IP66			無防水等級	IP66
醫療安規認證	IEC 60601-2-38			無醫療安規認證	IEC 60601-2-38
功能配備					
護欄雙面按鍵	●	●	●		●
床體/背部傾斜角度顯示	●	○	○	○	○
CPR快速釋放	○	○	○		○
防撞塊	●	●	●	●	
床尾控制	●	●	●		
手持床尾操作器	○	○	○		○
鎖定功能	●	●	●		
復歸功能	●	●	●		
手動控制系統	○	○	○		
氣壓棒				●	
手動傾斜		○	○	○	○
5吋防塵中控煞車系統	○	○	○	○	○
5吋防塵煞車輪	○	○	○	○	○
5吋一般輪	●	●	●	●	●
點滴架插孔	●(6)	●(6)	●(6)	●(6)	●(6)
引流袋掛勾	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)
床面擋片	●(6)	●(6)	●(6)	●(6)	●(6)

● = 標配 ○ = 選配

規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

02系列 多功能護理電動床




ES-02JH 多功能護理電動床

衛部醫器製壹登字第000547號



扶手式護欄 架設床邊後，可依需求選擇外翻角度或床身平行以保護臥床者

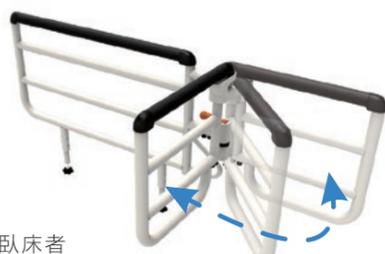

選配

手持操作器

方便使用者調整背部、膝部、頭膝聯動及床面升降




固定式護欄

此護欄可依需求與否隨時裝設於床體側邊、床尾或移除

全覆式護欄

架設床邊後，可依需求平放或垂直以保護臥床者

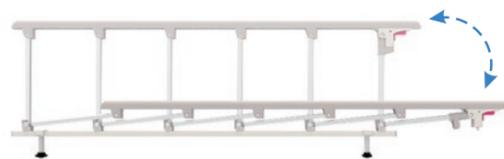


4吋防塵剎車輪



4吋防塵中控制車系統，採床尾踏桿，一次踩踏即可全床剎車。



可拔插式護欄收納座，護欄移除後可收納於床尾，不佔據空間

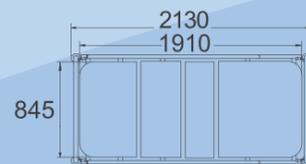


ES-02FDS 標準型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號



手搖桿用於操作背部、膝部及頭膝聯動調整

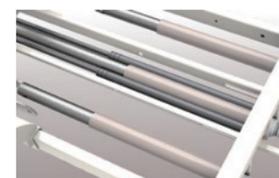

手動床輔助裝置

床身搖桿加裝氣壓缸，輕搖省力，增加搖桿使用壽命

MS-02FS & MF-02FS 標準型手動床

衛部醫器製壹登字第003251號



選配

手持操作器

方便使用者調整背部、膝部、頭膝聯動及床面升降



床尾控制(選配)


床尾下方另設有一控制面板，提供醫護人員作特殊功能控制

鎖定功能

設於床尾控制器，由醫護人員控制，可分別鎖定背部升降、膝部升降及床面升降

復歸功能

解除所有功能到平行位置

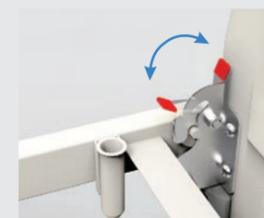

紅色開關固定床頭尾板





5吋防塵中控制車系統，採床尾踏桿，一次踩踏即可全床剎車



床頭尾開關

點滴架插座(共6處)

床面四週凸起，可防止床墊滑動

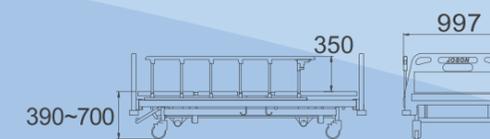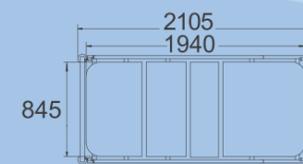

ES-16N系列 標準型電動照護床

衛部醫器製壹登字第000547號



MS-16NS系列 標準型手動照護床

衛部醫器製壹登字第003251號



床尾控制 選配

床尾下方另設有一控制面板，提供醫護人員作特殊功能控制

鎖定功能

設於床尾控制器，由醫護人員控制，可分別鎖定背部升降、膝部升降及床面升降

復歸功能

解除所有功能到平行位置



選配

全覆式護欄+P型輔助護欄

架設床邊後，可依需求平放或垂立以保護臥床者






手持控制器



5吋中控防塵煞車輪



臀板兩側點滴固定座

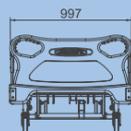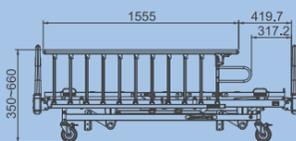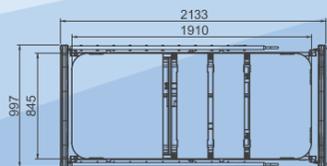

型號	ES-02JH	ES-02FDS	MS-02FS/MF-02FS	ES-16NS系列	MS-16NS
規格					
床全長 (至防撞塊)	L:2130mm	L:2105mm		L:2133mm	
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	ES-02JH - W:997mm(護欄升/降) ES-02FDS - W:997mm(護欄升/降) MS-02FS/MF-02FS - W:997mm(護欄升/降) ES-16NS/MS-16NS - W:997mm(護欄升/降) MS-16NS - W:997mm(護欄升/降)				
床面長	L:1910mm	L:1940mm		L:1910mm	
床面寬	W:845mm			W:845mm	
床面高度	H:320~630mm	H:390~700mm	MS-H:390~700mm MF-H:450mm	H:350~660mm	
背部床面升降	0~72°	0~80°	0~85°	0~85°	
膝部床面升降	0~28°	0~40°	0~40°	0~40°	
安全負載	170Kg	225Kg		225Kg	
床輪直徑	4"	5"		5"	
傳動方式(DC24V) 馬達數	3	3	手搖桿	3	手搖桿
供給電壓&頻率	AC 100~240V ; 50/60Hz		無供給電壓&頻率	AC 100~240V;50/60HZ	無供給電壓&頻率
後備儲電電池	DC 24V 2.0Ah	DC 24V 2.0Ah	無後備儲電電池	DC 24V 2.0Ah	
防水等級 (電控系統)	IP54	IP54	無防水等級	IP54	無防水等級
醫療安規認證	IEC 60601-2-52		無	IEC 60601-2-52	
功能配備					
手持操作器	●	●		●	
護欄	○	●	●	●	●
防撞塊	●	●	●	●	●
床尾控制		○		○	
鎖定功能		○		○	
復歸功能		○		○	
氣壓棒			● 3搖 ○ 2搖		●
防塵中控煞車	○	○	○	○	○
防塵煞車輪	●	○	○	○	○
一般輪		●	●	●	●
點滴架插孔	● (4)	● (6)	● (6)	● (4)	● (4)
引流袋掛勾	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)
床面擋片	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)

● = 標配 ○ = 選配

規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

08系列 養護床型



ES-08FDS
養護型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號

MS-08FS 三搖桿
MF-08FS 二搖桿
養護型手動床

衛部醫器製壹登字第003251號

ES-08FSS
養護型電動床(鐵板床面)

衛部醫器製壹登字第000547號

傳動方式：電動機組-3馬達

控制方式：手持操作器




手持操作器
方便使用者調整背部、膝部、頭膝聯動及床面升降

選配

5吋防塵煞車輪



4吋防塵煞車輪

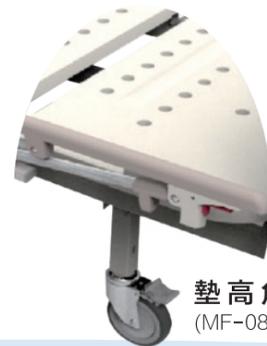

墊高角管
(MF-08FS 二搖桿)




引流袋掛勾




手持操作器



引流袋掛勾

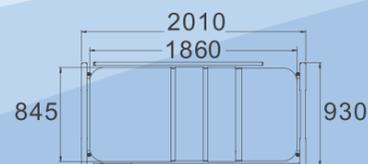


4吋輪高 420~620
5吋輪高 430~630


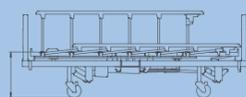


全長尺寸可選

EN-1M 居家照護電動床

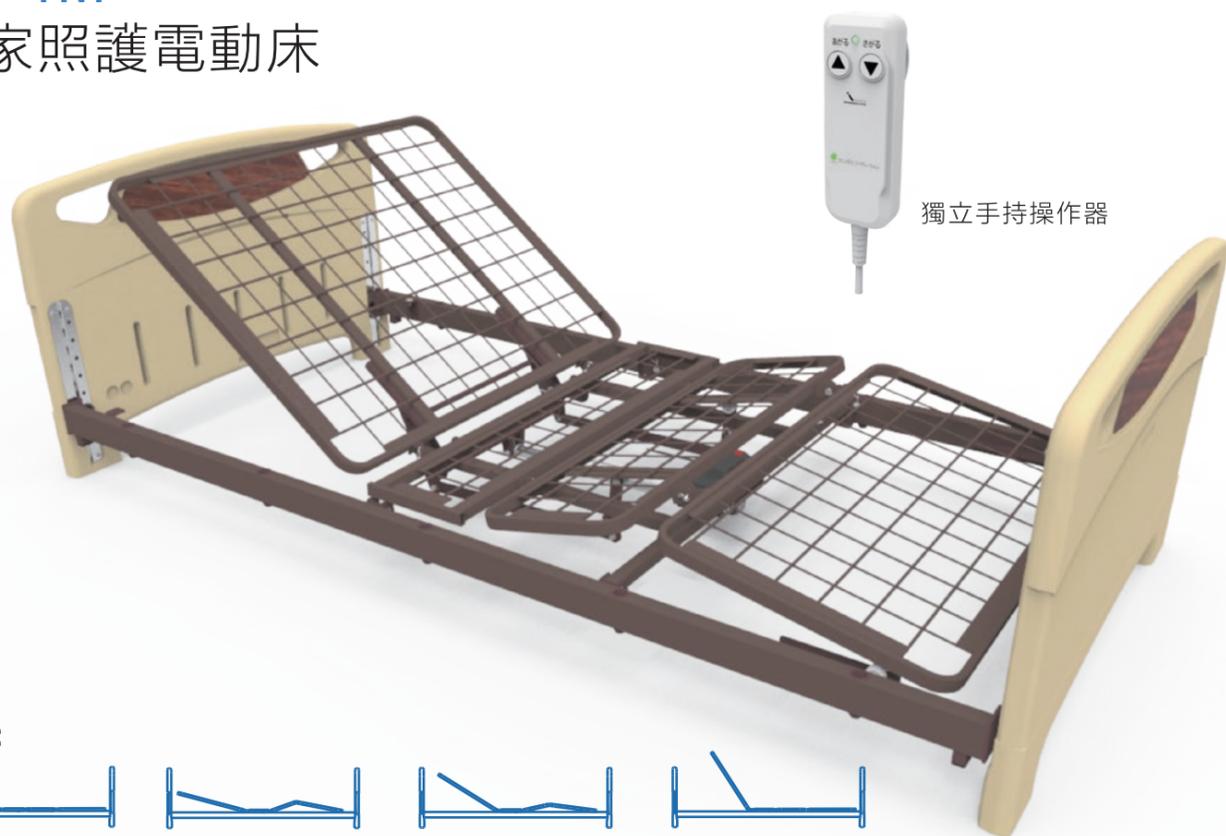

規格：

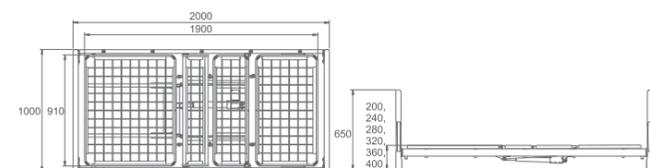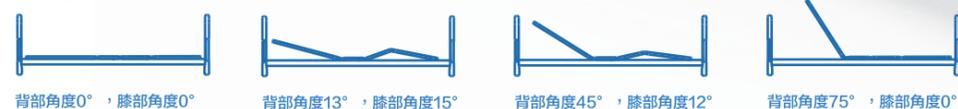

說明：

1. 床體結構為鋼製粉體塗裝。
2. 床面為鋼製網狀結構，床頭尾板為塑鋼一體成型，腳柱設計可穩定支撐床體不搖晃。
3. 床面高低調整簡易，共有離地20.24.28.32.36.40cm六種高度。
4. 附手持操作器，方便使用者調整背部與膝部角度。
5. 背部與膝部同步連動，可依當下需求調整舒適角度。
6. 結構設計結實不搖晃，整體總重只有50kg，方便移動。

可選用護欄：

A · 固定式護欄

可輕易插拔，並達到保護臥床者目的



B · 扶手式護欄

架設床邊後，可依需求選擇外翻角度或與床身平行以保護臥床者。



C · 全覆式護欄

架設床邊後，可依需求選擇平放或直立以保護臥床者。



型號	ES-08FDS	ES-08FSS	MS-08FS/MF-08FS
規格			
床全長 (至防撞塊)	L:2010mm	L:1960mm	L:2010mm
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	ES-08FDS - W:940mm(護欄升/降) ES-08FSS - W:930mm(護欄升/降) MS-08FS/MF-08FS - W:940mm(護欄升/降)		
床面長	L:1860mm	L:1770mm	L:1865mm
床面寬	W:845mm	L:815mm	L:845mm
床面高度	4吋輪 H:420~620mm 5吋輪 H:430~630mm		4吋輪 H:420~620mm 5吋輪 H:430~630mm MF-H:465mm
背部床面升降	0~80°	0~85°	0~80°
膝部床面升降	0~40°		
安全負載	170Kg		
床輪直徑	5"		
傳動方式 (DC24V) 馬達數	3	3	手搖桿
供給電壓&頻率	AC 115/230V; 50/60Hz	AC 115/230V; 50/60Hz	無供給電壓 & 頻率
後備儲電電池	無後備儲電電池		
防水等級 (電控系統)	IP42	IP42	無防水等級
醫療安規認證	無		
功能配備			
手持操作器	●	●	
護欄	●	●	●
防撞塊			
床尾控制			
鎖定功能			
復歸功能			
氣壓棒			
防塵中控煞車			
防塵煞車輪	○	○	○
一般輪	●	●	●
點滴架插孔	● (4)	● (4)	● (4)
引流袋掛勾	● (4)	● (4)	● (4)
床面擋片	● (6)	● (6)	● (6)

● = 標配 ○ = 選配 規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

JC-011 & JC-012 小兒病床

衛部醫器製壹登字第005942號

JC-012電動: 三馬達



5吋
防塵剎車輪


床尾控制
床尾下方另設有一控制面板，
提供醫護人員作特殊功能控制



鎖定功能
設於床尾控制器，由醫護人員控制，
可分別鎖定背部升降、膝部升降及床面升降



護欄升降控制把手
二側護欄各有兩組把手，同時握緊左右的握把，可調整護欄升降，
至標示高度後鬆開握把，並確認左右兩側卡定完成即可

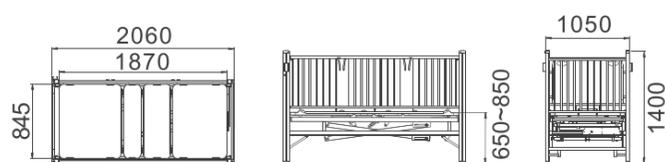


手持操作器
方便使用者調整背部、
膝部、頭膝聯動及床面升降

護欄升降
控制把手



JC-011手動: 二搖桿

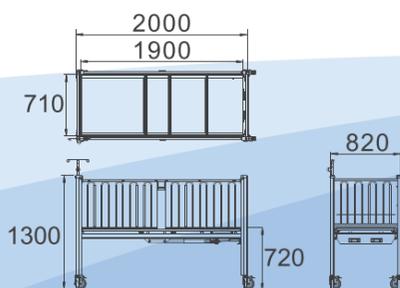

型號	JC-012	JC-011	JC-010
規格			
床全長 (至防撞塊)	L:2060mm	L:2000mm	L:1600mm
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	W:1050mm	W:820mm	
床面長	L:1870mm	L:1900mm	L:1510mm
床面寬	W:845mm	W:710mm	
床面高度	H:650~850mm	H:720mm	
背部床面升降	0~80°		
膝部床面升降	0~40°		無膝部床面升降
安全負載	170Kg	90Kg	90Kg
床面骨架	不鏽鋼粉體塗裝 SS304		
床輪直徑	5"	4"	
傳動方式 (DC24V) 馬達數	DC24V	手搖桿	
供給電壓&頻率	AC 110~240V;50/60Hz	無電壓&頻率	
後備儲電電池	DC 24V;2.0Ah	無後備儲電電池	
防水等級 (電控系統)	IP66	無防水等級	
功能配備			
手持操作器	●		
防撞塊	●		
床尾控制	●		
鎖定功能	●		
復歸功能	●		
防塵煞車輪	●		
一般輪		●	●
點滴架插孔	● (4)	● (4)	● (4)

● = 標配 ○ = 選配 規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

嬰兒床

塑鋼嬰兒床

JC-030嬰兒床 (304#不鏽鋼床架)

尺寸: 長680x寬380x高760mm

公差正負20mm

材質: 壓克力嬰兒盆

304#不鏽鋼床架



JC-031塑鋼嬰兒床 (ABS)

尺寸: 長700x寬440x高910mm

公差正負20mm


材質: 壓克力嬰兒盆

塑鋼蜂巢板櫃體

嬰兒盆可調整角度0~20度


JT-100 骨科牽引架

衛部醫器製壹登字第004255號


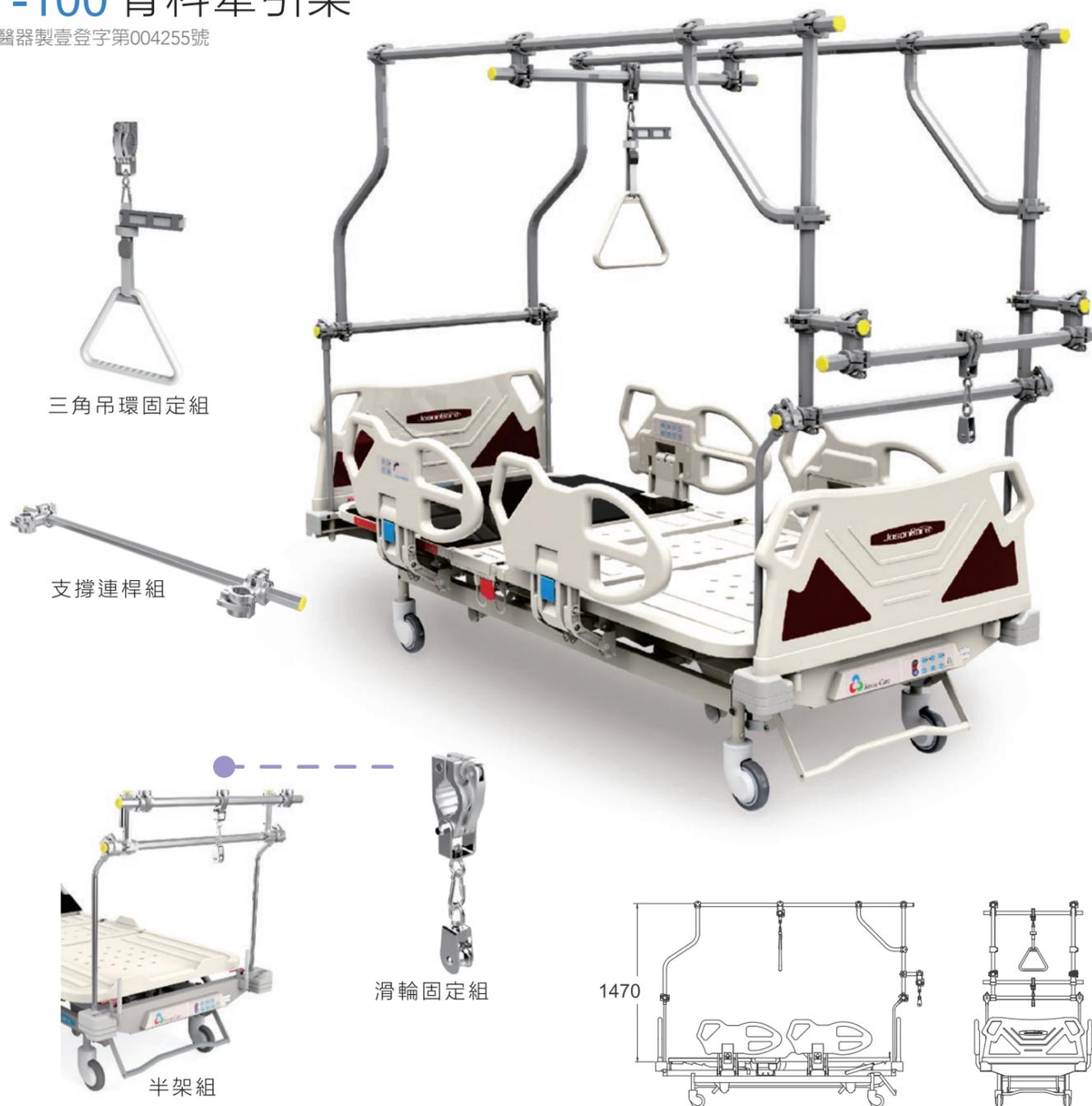


床墊

衛部醫器製壹登字第003169號

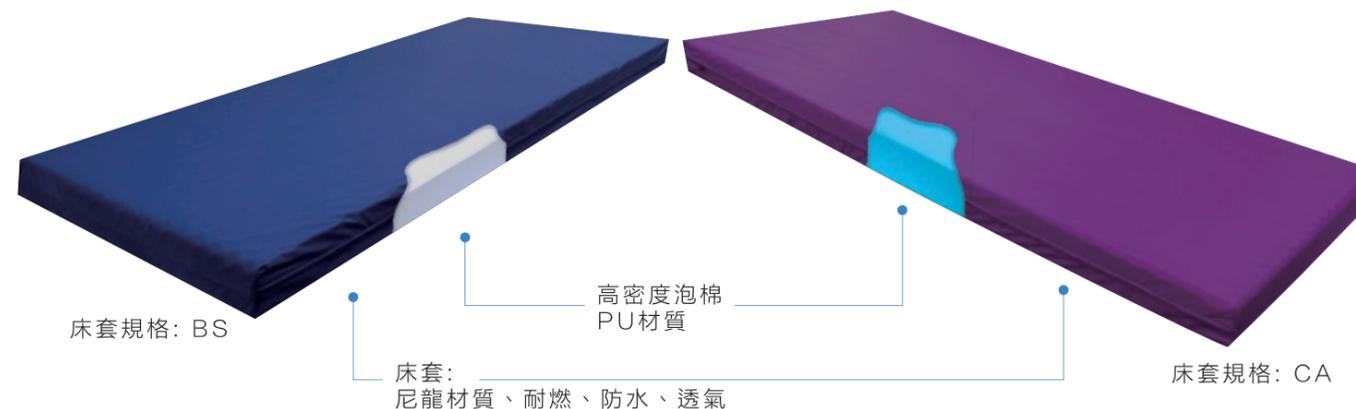

床墊形狀:

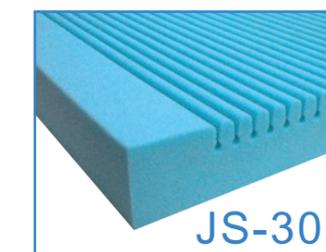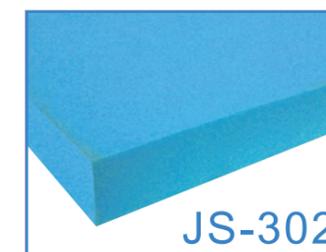

Size(配合床型尺寸):

12 series: L2000 × W880 × H120 mm
 96 series: L1980 × W890 × H100 mm
 05 series: L1900 × W890 × H100 mm
 99 series: L1900 × W890 × H100 mm
 02 series: L1930 × W840 × H100 mm
 08 series: L1850 × W840 × H100 mm
 公差: 長&寬 -0, +2cm 高 ±0.5cm
 *各床型若有其它厚度, 歡迎來電洽詢

JC-012 :L1930 x W860 x H75 mm
 JC-011 :L1920 x W720 x H75 mm
 JC-010 :L1520 x W720 x H75 mm
 *兒童床之床墊適用於JS-302CA

- 說明**
1. 本牽引架適用於各種床系, 利用床體四個點滴架孔固定牽引架主體。
 2. 牽引架固定座主體為寬心不鏽鋼。
 3. 開關扳手為可快速調整扳手, 無需準備工具組裝。
 4. 牽引架備有三角吊環固定組與滑輪固定組各一組。
 5. 牽引架延伸桿採用八角鋁管一體成型。
 6. 牽引架備有兩組補強桿組, 可增加牽引架強度, 以避免掉落造成患者傷害。
 7. 三角吊環固定組為可調整式, 適度調整位置與長度, 可避免患者離床或姿勢改變造成頭部撞擊。

型號	JS-301BS	JS-301CA	JS-302BS	JS-302CA	JS-303BS	JS-303CA
床套	耐燃、防水、透氣		耐燃、防水、透氣		耐燃、防水、透氣	
耐燃標準	BS-7177	CA-117	BS-7177	CA-117	BS-7177	CA-117
高密度泡棉	耐燃、RoHS		耐燃、RoHS		耐燃、RoHS	
抗菌	Y	Y	Y	Y	Y	Y

JR-031 & JR-031P

移動式餐桌



規格: 長820 x 寬380 x 高765~1110mm
 包裝: 長840 x 寬510 x 高150mm
 桌面安全使用負載: 20kg
 材質: 鋼製粉體塗裝、美耐木頭桌面

氣壓式輔助升降，側面控制扳手輕輕往上扳後，桌面向下壓，即可隨意調整您需要的高度。

材質:
 ABS桌面及抽屜，
 易擦拭清潔


底座材質:
 底座ABS蓋板，易擦拭清潔，
 附2吋一般輪(2輪剎車功能)

JR-031


扳手輔助升降



JR-031P

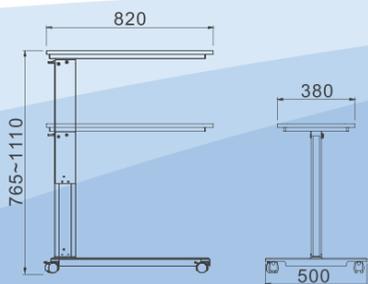

型號	JF-014 床頭櫃
規格	L460 x W460 x H860 mm
材質	整體塑鋼ABS一體成型抽屜、門、毛巾架、拖鞋及臉盆置放架 塑鋼ABS一體成型 拉板內附杯座及溫度計座、正面圓弧造型

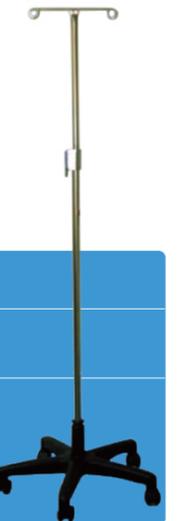

型號	JD-010 陪伴椅	JR-016 二爪點滴架
規格	L800 x W600 x H950 mm 展開: L1850 x W600 x H700 mm	1620~2300mm
材質	腳架: 1 1/2" 304# 不鏽鋼 坐墊: 高密度泡棉, 外覆南亞人造皮	整體304# 不鏽鋼




型號	JR-011 移動式餐桌	Y0307-SY 伸縮餐板
規格	L765 x W385 x H720~1120 mm	L890~1060 W320 H30mm
材質	鋼製粉體塗裝、美耐板桌面	ABS餐板、鋁製伸縮館，背面附掛勾


JE-350 多功能液壓推床

衛部醫器製壹登字第006029號



全身X-Ray

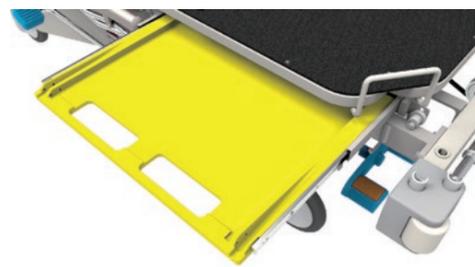

床面下設置X光片夾置放滑槽，可調整X-Ray照射位置，方便患者不下床即可做檢查

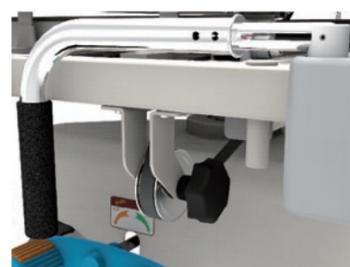

X光片夾位置移動由旋鈕轉動方位

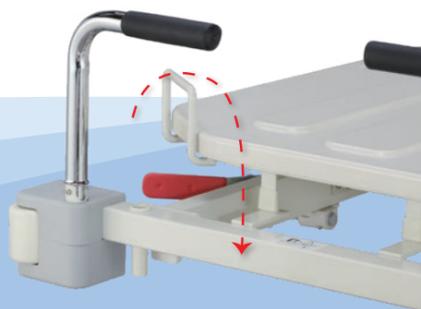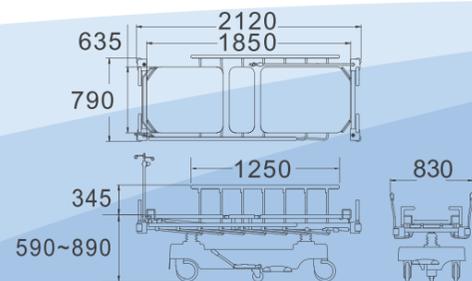

四角裝設塑鋼一體成型防撞保護裝置，並有防撞輪設置



選配配件：
儀器置放架設置於床尾

JE-300 多功能液壓推床

衛部醫器製壹登字第006029號

ABS板




附氧氣瓶置放架設置於床頭



第五輪轉向系統

1. 更輕鬆省力的推送液壓推床
2. 方便旋轉、轉彎，減少迴轉半徑

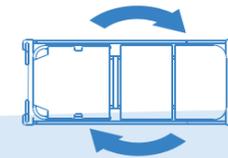


床頭尾端各一組
折合式點滴架



背部床面升降
由兩支氣壓棒推送上升下降



紅色把手為釋放護欄裝置，
其設計易於辨別顏色及固定

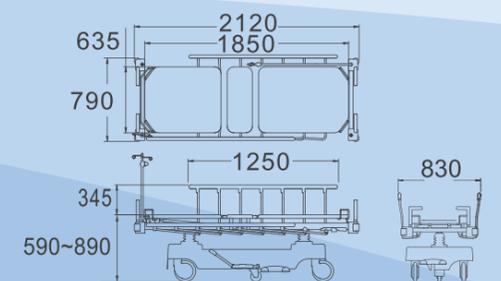


JE-200(第五輪) 多功能液壓推床

衛部醫器製壹 字第006029號




推送把手可折合收藏

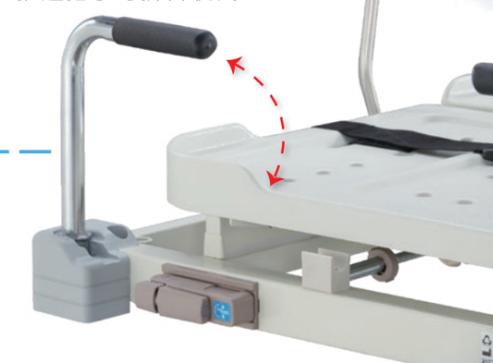

膝部升降開關

第五輪轉向系統


1. 更輕鬆省力的推送液壓推床
2. 方便旋轉、轉彎，減少迴轉半徑

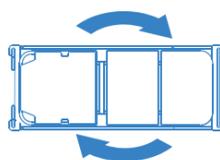

氧氣瓶架可掛於推床前後兩側



床邊兩側中央設有踏板以操作床面升降及傾斜動作

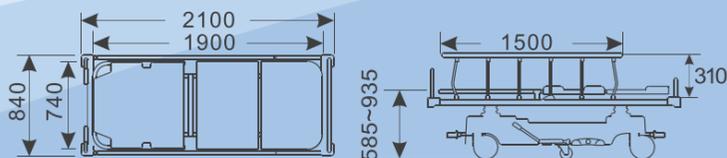

型號	JE-350	JE-300	JE-200
規格			
床全長 (至防撞塊)	L:2120mm		L:2100mm
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	W:830mm(護欄升) 790mm(護欄降)		W:840mm(護欄全寬) 825mm(護欄寬)
床面長	L:1850mm		L:1900mm
床面寬	W:635mm		W:740mm
床面高度	H:590~890mm		H:585~935mm
背部床面升降	0~90°		0~90°
膝部床面升降	無膝部床面升降		0~22°
床面傾斜	±16°		±18°
安全負載	225Kg		
床面骨架	鋼製粉體塗裝		
床輪直徑	8"		
傳動方式 (DC24V) 馬達數	背部: 氣壓棒 手搖桿(JE-200) 床面升降, 氣壓棒		
功能配備			
X-Ray	●		
全身X-Ray	●		
全覆式護欄	●	●	●
推送把手	●	●	●
防撞輪	●	●	
防撞塊			●
中控煞車系統	●	●	●
定向輪	●	●	●
防塵煞車輪	●	●	●
氧氣瓶架	●	●	○
置物槽	●	●	●
點滴架插孔	● (2)	● (2)	● (2)
引流袋掛勾	● (6)	● (6)	● (0)
約束帶	○	○	○

● = 標配 ○ = 選配

規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

JE-130 JE-120 JE-100 急診推床



JE-130 3搖急診推床

規格：L1900 x W750 x H650mm
 床體材質採用不鏽鋼 304#
 背部角度 0~80°
 膝部角度 0~35°
 床體高度 550~750mm
 搭配四顆6"床輪（煞車輪x4）
 床體兩側各有2組點滴架插孔
 氧氣瓶置放架
 床套：人造皮革
 床墊：2"高密度泡棉（L1800 x W550 XH50mm）



JE-120 2搖急診推床

規格：L1900 x W750 x H650mm
 床體材質採用不鏽鋼 304#
 背部角度 0~80°
 膝部角度 0~35°
 搭配四顆6"床輪（煞車輪x4）
 床體兩側各有2組點滴架插孔
 氧氣瓶置放架
 床套：人造皮革
 床墊：2"高密度泡棉（L1800 x W550 XH50mm）




JE-100 簡易急診推床

規格：L1900 x W750 x H650mm
 床體材質採用不鏽鋼 304#
 背部角度 0~80°
 搭配四顆6"床輪（煞車輪x4）
 床體兩側各有2組點滴架插孔
 氧氣瓶置放架
 床套：人造皮革
 床墊：2"高密度泡棉（L1800 x W550 XH50mm）

型號	JE-130	JE-120	JE-100
規格			
床全長 (至防撞塊)	L:1900mm		
床全寬 (護欄升起 / 護欄放下)	W:750mm (護欄升/降)		
床面長	L:1810mm		
床面寬	W:550mm		
床面高度	JE-130-H:550~750mm	JE-120/100-H:650mm	
背部床面升降	0~80°		
膝部床面升降	JE-130/120-0~35°	JE-100-N/A	
安全負載	150kg		
床面骨架	SS304		
床輪直徑	6"		
傳動方式 (DC24V) 馬達數	JE-130/120-手搖桿		JE-100-把手
功能配備			
全覆式護欄	●		
推送把手			
一般輪	●		
氧氣瓶架	●		
置物槽	●		
點滴架插孔	● (2)		
引流袋掛勾			

● = 標配 ○ = 選配 規格公差: 床全長/寬/高 正負20mm 護欄寬 正負30mm 角度 正負5%

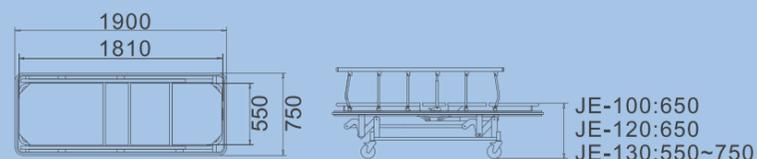


48人份UD藥車



JA-107



安全鎖措施可依需求
使用鎖匙或拋棄式急救車號碼鎖

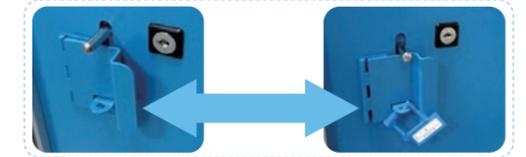

JA-107



急救車選購配件



1. 車體支架為鋁合金，車身為鋼製粉體烤漆。
2. 上下蓋使用ABS材質，美觀易清洗。
3. 車體抽屜包括：
3吋抽屜：2組、6吋抽屜：2組、9吋抽屜：1組。
4. 3吋與6吋抽屜內部含直式隔板三片與橫式隔板兩片。
5. 多樣化週邊配件，增設方便且配置彈性。

