

ES-05HD

旗艦型電動床(旋轉式)

衛署醫器製字 字第000547號

護欄為塑鋼一體成型，旋轉式共 4 組，放下時縮於床面下方；每組護欄外側設有安全開關；欄框之設計易於施力移動病床。


-  背部上升0~85°
-  膝部上升0~32°
-  頭部-膝部聯動功能
-  床面升降450~755mm



說明:

新型第M342806號專利

1. 床體結構為鋼製粉體塗裝。
2. 床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔；手、腹、膝、腳設有約束帶孔；頭腳&左右二側共凸起六處，可防止床墊滑動。
3. 引流袋(尿袋)掛勾設於左右二側臀板下方。
4. 床體四角設有防撞裝置，避免床體移動之碰撞損壞床體。
5. 床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之使用。左右設有把手，把手水平方便拆卸、把手斜面易於施力移動病床，床體四周設有紅色開關固定床頭尾板。
6. 附充電電池，以配合臨時停電或移動病床時使用。
7. 可調整床身至座椅的位置，以便病患用餐或閱讀。
8. 設頭、膝聯動控制鍵，可同時調整背部及膝部位置，避免病患下滑，使病患隨時調整最舒適的位置。

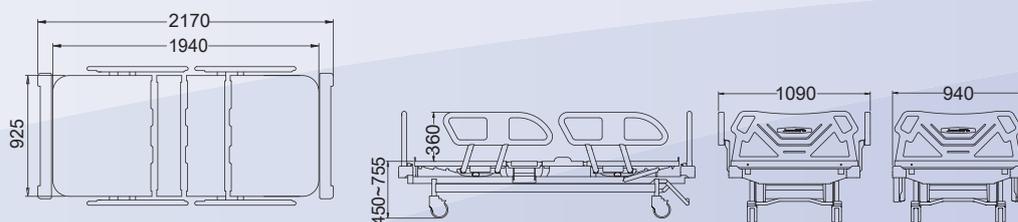




安全之設計結構

床體結構之設計通過IEC 60601-2-38
最新版之病床安規



床墊防滑設計

床面四週凸起，可防止床墊滑動

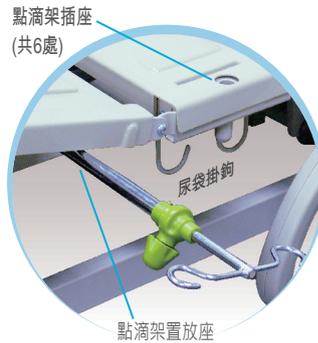

點滴架置放設計



床頭尾開關



床尾護士控制器

床尾下方另設有一控制面板，提供醫護人員作特殊功能控制



鎖定功能

設於床尾控制器，由醫護人員控制，可分別鎖定背部升降、膝部升降、床面升降



角度顯示

護欄雙面按鍵&角度顯示

外側提供背部&床面高度調整，外側並附有角度顯示功能，可隨時監控背部的角度



CPR快速釋放(選配)

1. 緊急狀況時，可使背部床面在2~3秒內快速放平，以便進行CPR急救病患



2. 床尾控制面板設有電動控制CPR下降功能按鍵，可啟動三支馬達同步快速下降達到CPR體位



電動傾斜(選配)

三組馬達控制，搭配手拉傾斜開關&床尾控制面板操作，即可達到垂頭仰臥式或頭高腳低式，以便配合人體引流或胃食道逆流...等之特殊醫療

中控煞車系統(選配)

5"防塵輪，可防止毛髮捲入輪心；系統採床尾踏桿，一次踩踏即可全床煞車。

